

## **Handleiding demontage handrem:**

Draai eerst de remkabel loss(er) (zie afstellen van de rem, onderin dit bestand), zodat de demontage makkelijker zal verlopen.



Verwijder de schroef die bij het voorwiel zit (zie afbeelding hierboven) die de remkabel in positie houdt. Zorg ervoor dat de remkabel niet (te ver) naar binnen schiet.



Verwijder vervolgens ook de borgpin bij het handvat van de rollator (zie foto hierboven). Zorg ervoor dat je deze pin wel bewaart.

Druk vervolgens de remhendel naar beneden zodat je het uiteinde van de remkabel die dan nog aan de handrem vast zit kan losmaken(zorg dat de remkabel niet naar binnen schiet).



De handrem is nu los en kan worden vervangen door een andere.

Nadat de handrem is vervangen kunnen de stappen in omgekeerde volgorde weer gevolgd worden zodat de handrem weer kan worden gebruikt.

## **Afstellen van de rem.**

- Draai met de bijgeleverde inbus sleutel de rem strakker of lossen, door de schroef naar rechts te draaien stelt u hem strakker en naar links is dan automatisch lossen.



(zie bladzijde 12 van het Active-rollator boekje)